

取扱い説明書



製品安全協会SG合格品

PAT登録済

取扱い説明書は必ず読み、読まれた後は保管してください。

歩行車(ロータ)

ピウプレスト
Piupresto 75

このたびは、弊社商品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
この説明書を注意深く読んでいただき、ご理解の上で使用ください。

【ご利用にあたってのご注意と取扱い方法】


- この製品は、歩行の安定性確保または支持のために用いる歩行補助機器です。
- ご使用前に必ず医療機関、福祉用具専門員またはケアマネージャーにご相談の上で使用ください。
- ご使用に際して、体調の状態によっては危険な場合もありますので、無理な使用(歩行)はしないでください。
- 駐車用ストッパー、手元ブレーキの左右両輪の性能については、十分に理解してご使用ください。

【表示マークの説明】

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区別し、説明しています。

- ⚠ **禁止** この表示の注意事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ⚠ **注意** この表示の注意事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

各部名称

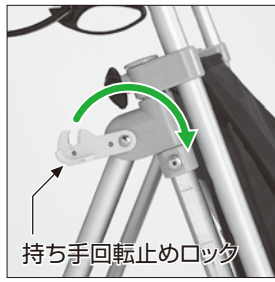

持ち手回転止め ロック

左右のロックをはずすと回転します。

持ち手高さ調節ビス (左右にあります)

杖・傘止め バンド

駐車用ストッパーボタン

持ち手

手元ブレーキレバー

座面収納バンド

(後ろ中央にあります)

エプロンバッグ

袋以外の所に荷物を
入れないでください。

座面

座面に座るときは、必ず駐車用
ストッパーを掛けてください。

歩行速度調節 コントローラー

手元 ブレーキ調節

(黄色ネジ)

駐車用ストッパー

杖・傘受け

⚠ 禁止

- 火の近くに放置しないでください。

お手入れ方法

- 使用後は乾いた布で、土や砂を拭き取ってください。
- 可動部・連結部には時々油をさしてください。
- シナーやベンジンなどの揮発性の溶剤でバッグなどを拭かないでください。

保管上の注意

- 長期間使用しない場合は、高温多湿の場所は避けて、陽の当たらない場所に保管してください。
- 雨ざらしにしないでください。
- 炎天下に放置しないでください。変色の原因となります。
- 寒冷時に戸外に放置しないでください。袋が硬化する原因となり、製品の開閉がしにくくなります。

保安上の注意

- 非常口や消火器、消火栓の前には放置しないでください。
- 当社サービス員以外の改造は行わないでください。
- 幼児や子供の手の届く所には、放置しないでください。

廃棄するときの注意

- 放置せず、各自治体の指示にしたがい廃棄してください。

	内 容	材 質
型 式	歩行車(ローター) ピウプレスト75	
車 体	左右連動回転持ち手、6段階持ち手高さ調節 手元ブレーキ、駐車用ストッパー、カサ立て付	アルミニウム (一部プラスチック)
本 体 重 量	7.0kg	
完 成 寸 法	巾62×奥行64×高さ80・83・86・89・92・95cm	
収 納 寸 法	巾32×奥行64×高さ80cm	
袋	エプロンバッグ	ナイロン
座 面 の 高 さ	42cm	
積 載 重 量	エプロンバッグ/2kgまで	
製 造 年 月 日	車体の下部内側に記載	
品質保証期間	ご購入日より1ヵ年(詳しくは下記参照)	
SG保証期間	ご購入日より4ヵ年(詳しくは下記参照)	
附 属 品(別売)	レインカバー 3,240円(本体価格3,000円)	

※別売商品のお求めは、お買い求めのお店、またはお近くの販売店でどうぞ。

保証基準

- ①この商品の保証期間はお求めの日より1ヵ年です。
- ②保証期間内には、部品の欠品、不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理をいたします。使用者の責任によるものは実費修理といたします。
- ③次の項目は無償サービスから除外されます。
 - A. 車体の自然劣化(メッキや塗装は時々手入れを必要とします)。
 - B. 袋のキズや破れ。
 - C. 間違った使い方や手入れ不良によるもの。
 - D. タイヤ、車輪の自然消耗。
 - E. 使用者の造作変更によるもの。
 - F. 災害・事故などによるもの。
 - G. 実費修理に要する運賃などの諸経費。
- ④一度使用したものは原則として製品のお取り替えはできません。
- ⑤製品についての各種お問い合わせは、お求めの店またはメーカーに直接ご連絡ください。

ご購入より4ヵ年経過した製品についても修理はいたしますが、修理した製品についての品質、安全の保証はいたしかねます。

ただし、製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理ができないこともあります。

ご購入年月日

年 月 日

ご購入販売店名

ご購入販売店住所 (〒 -)

TEL. () -

SGマークが表示された歩行車は安心してお使いいただけます。

SGマーク制度は、SGマーク付き製品の欠陥により発生した、人身事故に対する賠償制度です。

★ただし、保証期間はご購入後4ヵ年です。

■事故の届出についてのご注意

●認定した歩行車そのものが故障しても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも傷害など身体的な損害について賠償する制度です。

●生産物賠償責任保険の保険金は、それぞれ実情をよく調査して、身体的な損害(人的損害)について賠償することになります。

■製品の欠陥により事故が起きた場合

別欄の項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会または協会が指定するところに届けてください。

製品安全協会 〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2
ミサワホームズミノ輪2階 Tel.03-5808-3300

事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となったSGマーク表示の製品
(イ) 製品の名称 (ロ) 製品の購入先、購入年月
- ② 事故発生状況
(イ) 事故発生年月日 (ロ) 事故発生場所 (ハ) 事故発生状況
- ③ 被害の状況
(イ) 被害者の氏名、年齢、職業、住所
(ロ) 被害の状況と程度

withone 株式会社

(旧社名 象印ベビー株式会社)

製品安全基準認定工場

本 社 〒577-0037 東大阪市御厨西ノ町1丁目5-4 TEL.06-6788-8928(代) FAX.06-6788-8939

東京営業所 〒135-0002 東京都江東区住吉1-1-2 TEL.03-3631-3501(代) FAX.03-3631-7016

お客様相談室 〒577-0037 東大阪市御厨西ノ町1丁目5-4 TEL.06-6618-1409

サービス係 大阪 TEL.06-6787-2468